



Les kits de prélèvement utilisés jusqu'ici pour les frottis nasopharyngés du test PCR SARS-CoV-2 (COVID-19) sont toujours difficilement livrables, et ce dans le monde entier.

Nous recommandons par conséquent de réaliser un frottis de gorge et un frottis nasal. Des études récentes montrent que la sensibilité de cette méthode de prélèvement est équivalente à celle du frottis nasopharyngé.

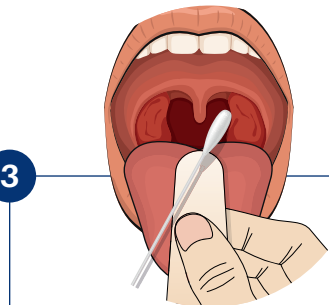

3 Frottis de gorge: effectuer le prélèvement sur la paroi postérieure du pharynx en tournant légèrement.

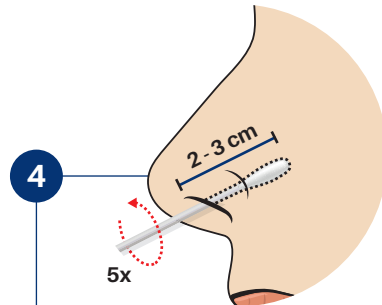

4 Frottis nasal: introduire le même écouvillon en tournant légèrement obliquement vers le haut dans les deux narines jusqu'à une profondeur de 2 - 3 cm.

1


Matériel nécessaire :

- 1 kit de prélèvement:
- 1 tube PCR avec milieu de transport et 2 écouvillons

2

Instructions de prélèvement


Coller l'étiquette code-barres sur le tube contenant le milieu de transport ou y inscrire les nom, prénom et date de naissance du patient.

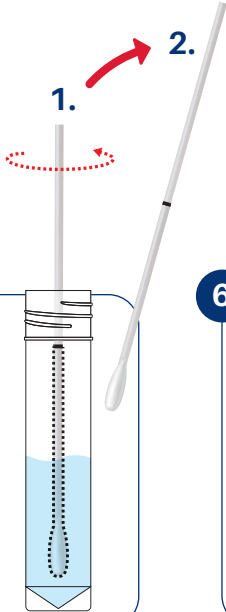

5 Bien faire tourner l'écouvillon dans le milieu de transport, exercer une pression sur l'écouvillon et le retirer.

Ne pas couper ou casser l'écouvillon, il ne doit pas rester dans le tube contenant le milieu de transport!

- Éliminer l'écouvillon avec les déchets infectieux.

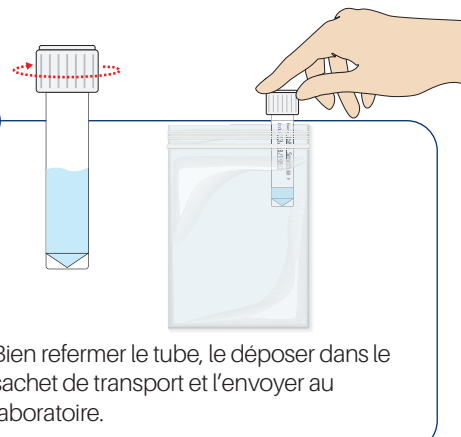

6 Bien refermer le tube, le déposer dans le sachet de transport et l'envoyer au laboratoire.

i

Rappel concernant le droit au remboursement

Afin que l'analyse puisse être remboursée, il est indispensable de nous indiquer le nom de la caisse maladie, ainsi que le numéro d'assuré. Et pour respecter les critères de la déclaration obligatoire, indiquer également le numéro de téléphone du patient.